



# ALPINE EAR SPRAY

Alpine Ear Spray ist ein Hilfsmittel, um übermäßiges Ohrenschmalz einfach und sicher aus dem Gehörgang zu entfernen. Ohrenschmalz formt einen natürlichen Schutz Ihres Ohres und Gehörganges. Übermäßiges Ohrenschmalz kann jedoch störend sein. Das Alpine Ear Spray eignet sich daher sehr gut für Menschen, die an übermäßigem Ohrenschmalz leiden, für Träger von Ohrstöpseln und Hörgeräten und Menschen, die sich oft in einer staubigen Umgebung befinden. Regelmäßiger Gebrauch des Sprays beugt Bildung von übermäßigem Ohrenschmalz vor und beugt der Notwendigkeit eines Besuchs beim Ohrenarzt zur Reinigung des Gehörganges vor.

## MILDE UND EFFEKTIVE REINIGUNG

Das Spray sorgt für eine sehr milde und effektive Reinigung. Im Gegensatz zu vielen anderen Ohrsprays enthält das Alpine Ear Spray den aktiven Bestandteil Polysorbat 80, welches Ohrenschmalz effektiver entfernt als traditionelle Salzlösungen. Außerdem ist das Alpine Ear Spray angereichert mit Kamille, welches den Gehörgang und das Ohr mildert und beruhigt. Das Alpine Ear Spray Flakon besitzt eine spezielle Düse, welche sicherstellt, dass bei der Verwendung des Sprays nicht zu viel Druck auf das Trommelfell ausgeübt wird.

## OHRS TÖPSEL HALTEN LÄNGER

Das Entfernen von übermäßigem Ohrenschmalz ermöglicht, Ohrstöpsel länger benutzen und sauber halten zu können. Alpine Ear Spray verlängert somit die Nutzungsdauer von Ohrstöpseln.

## PRODUKTMERKMALE

- Ist ein sicheres Hilfsmittel bei der Entfernung von übermäßigem Ohrenschmalz
- Milde Formel mit aktiven Stoffen, die das übermäßige Ohrenschmalz effektiv entfernen
- Beruhigt und beugt Reizung des Gehörganges vor
- Praktischer Sprühflakon
- Sichere Düse stellt sicher, dass kein Druck auf das Trommelfell ausgeübt wird

## ANWENDUNGSVORSCHRIFT

1. Halten Sie das Spray recht vor dem Gehörgang. Drücken Sie die Pumpe eine Sekunde lang.
  2. Neigen Sie den Kopf, damit das Spray und das Ohrenschmalz aus dem Ohr hinauslaufen können.
  3. Falls notwendig, wiederholen Sie diese Handlung.
  4. Reinigen Sie die Pumpe nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser.
  5. Bei übermäßigem Ohrenschmalz sprühen Sie 2 bis 3 Mal pro Woche 1 bis 2 Mal.
- Das Spray kann auch einfach unter der Dusche verwendet werden, um Rückstände des Sprays und sich gelöstes Ohrenschmalz in Schritt 2 einfach wegzuspülen.
  - Nicht verwenden: bei Mittelohrentzündung, einem Loch im Trommelfell oder bei Röhrrchen, bei Kindern jünger als 2,5 Jahre, nach einer Ohrenoperation.
  - Ziehen Sie einen Arzt zu rate, wenn die Ohren schmerzen.
  - Warnhinweise: Achtung! Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen - Vor Sonneneinstrahlung schützen - Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alpine Ear Spray entspricht allen Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Hilfsmittel der Klasse IIa.

## SPEZIFIKATIONEN

Alpine Ear Spray wird in einem Flakon von 50 ml geliefert und enthält die folgenden Inhaltsstoffe:

- Wasser
- Natriumchlorid
- Wässrige Lösung polyaminopropyl biguanide 20%
- Glycerin
- Polysorbat 80
- Kamille-Extrakt

