

SOUNDGATE

SoundGate für Festnetztelefone

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

Einführung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Benutzung des SoundGate für den Empfang von Telefonaten.


Der Telefon-Adapter ermöglicht eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem SoundGate und Ihrem Haustelefon. Der Telefon-Adapter unterstützt eingehende und ausgehende Telefonate gleichermaßen. Das SoundGate ermöglicht so freihändiges Telefonieren.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Telefon-Adapter gemäss Bedienungsanleitung korrekt mit dem Telefonanschluss und dem Stromnetz verbunden ist. Folgen Sie dazu bitte der Installationsanleitung des Telefon-Adapters.

Eine kabellose Telefonverbindung ist innerhalb eines Radius von ca. 10 m zum Telefon-Adapter möglich.



SoundGate Übersicht

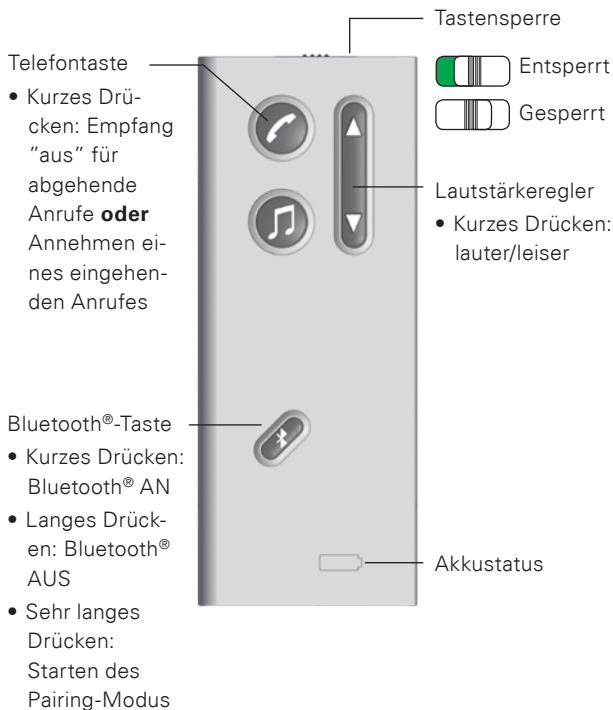

Telefonate können auch bei aktivierter Tastensperre empfangen werden!

Eingehende Anrufe

Bevor Sie sprechen

Tragen Sie das SoundGate mit der Umhängekordel um Ihren Hals. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres SoundGate eingeschaltet ist und dass Sie sich innerhalb der Reichweite des Telefon-Adapters (max. 10 m) befinden. Die Statusleuchte des Telefon-Adapters sollte dauerhaft leuchten.

Eingehender Anruf

Sie hören einen Klingelton in Ihren Hörsystemen und die Telefontaste blinkt grün.



Telefonat annehmen

Drücken Sie kurz auf die SoundGate Telefontaste. SoundGate wird den Anruf annehmen und die Telefontaste leuchtet nun dauerhaft grün. Das Telefonat wird jetzt direkt an die Hörsysteme übertragen. Sprechen Sie in einer normalen Lautstärke, als ob Ihnen Ihr Gesprächspartner gegenüber sitzt. Die rote Statusleuchte des Telefon-Adapters blinkt während des Telefonates rot.



 Status

Telefonat beenden

Drücken Sie erneut kurz auf die Telefontaste des SoundGate. SoundGate wird das Telefonat beenden, das grüne Licht der Telefontaste erlischt. Die rote Statusleuchte des Telefon-Adapters leuchtet nun dauerhaft.



 Status

Abgehende Anrufe

Tätigen eines Anrufes

Drücken Sie kurz auf die Telefontaste des SoundGate oder drücken Sie kurz die rote Taste am Telefon-Adapter.

Sie hören nun das Freizeichen in Ihren Hörsystemen. Die Telefontaste leuchtet nun dauerhaft grün.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Anruftaste Ihres Telefons und wählen Sie zügig die gewünschte Nummer. Wenn Sie das Telefonat beenden möchten, legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Anruf beenden Taste Ihres Telefons.

Die Statusleuchte des Telefon-Adapters blinkt während des Telefonates rot.



Status

Telefonat beenden

Drücken Sie erneut kurz auf die Telefontaste des SoundGate. SoundGate wird das Telefonat beenden, das grüne Licht der Telefontaste erlischt.

Die rote Statusleuchte des Telefon-Adapters leuchtet nun dauerhaft.



Status

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefonat beendet ist, bzw. der Hörer Ihres Telefons aufgelegt ist!

Hinweis: Ihre Sprachlautstärke wird für Ihren Gesprächspartner durch das SoundGate automatisch konstant gehalten, Sie sollten dennoch immer laut und deutlich sprechen. Falls notwendig (z.B. im Hintergrundlärm), sprechen Sie direkt in das Mikrofon des SoundGate.