

## Geemarc Kopfhörerserie CL7370

### Kopplung eines zusätzlichen Kopfhörers mit der Basisstation

1. Um die Basis und den Kopfhörer zu koppeln, stellen Sie sicher, dass die Akkus vollständig aufgeladen sind und die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Schalten Sie alle bisher gekoppelten Kopfhörer aus (s. Abb. 1).
3. Schalten Sie die Basisstation aus (s. Abb. 1).



4. Nehmen Sie den Kopfhörer, den Sie koppeln wollen, in die Hand und schalten Sie ihn durch Drücken der Power-Taste an (s. Abb. 2).
5. Drücken Sie gleichzeitig auf die beiden Tasten hinter dem Kopfhörer (TONE und BALANCE) und halten Sie sie solange gedrückt, bis das blaue Licht an der Vorderseite des Kopfhörers schnell blinkt. Dann lassen Sie die Tasten los (s. Abb. 2).



6. Schalten Sie die Basisstation wieder an, das blaue Licht beginnt zu blinken. Wenn es aufhört zu blinken und konstant an bleibt, ist die Kopplung abgeschlossen (s. Abb. 3.).

