

**KURZANLEITUNG:
Installation &
Kopplung**



TV • FESTNETZ • HANDY • MIKROFON


TV

Installation und Kopplung

Installation des ConnectLine TV Adapters


1. TV Adapter mit Netzstrom verbinden

Die LED leuchtet konstant grün.

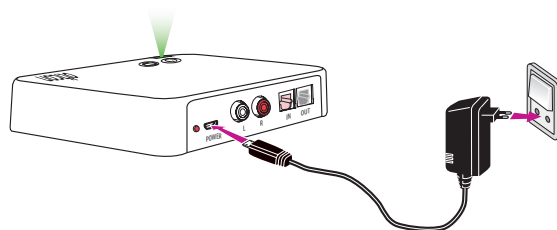

2. TV Adapter mit Fernseher verbinden

Stecken Sie das Cinch-RCA Kabel je nach Farbe in den Audioausgang des Fernsehers. Verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit dem TV Adapter.*

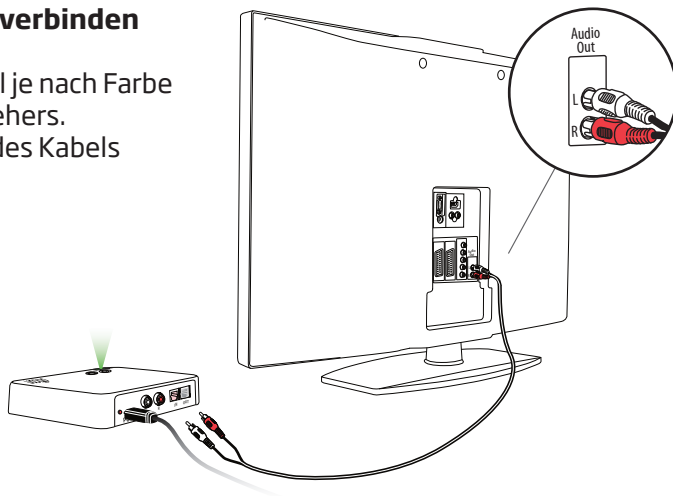

* Weist der Fernseher keinen entsprechenden Audioausgang auf, finden Sie in der Bedienungsanleitung alternative Anschlussmöglichkeiten.

Kopplung von Streamer Pro und TV Adapter

Wichtig:


TV Adapter ist mit dem Netzstrom verbunden.
Streamer Pro ist vollständig geladen.



1. Streamer Pro und TV Adapter koppeln

Drücken Sie die An/Aus Taste am Streamer Pro für 7 Sekunden bis die blaue LED schnell blinkt.

Legen Sie den Streamer Pro in die Nähe (ca. 20 cm) des TV Adapters.

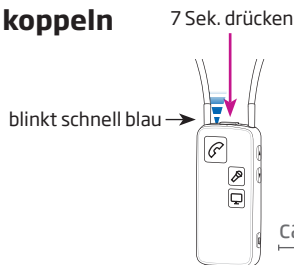

2. Kopplung abschließen

Warten Sie ca. 1 Minute bis die Kopplung abgeschlossen ist. Die TV-Taste am Streamer Pro und die LED am TV Adapter leuchten konstant orange.




Telefonieren Festnetz & Handy

Installation und Kopplung

Installation des ConnectLine Phone Adapters


1. Phone Adapter mit Netzstrom verbinden

Die LED leuchtet konstant grün.

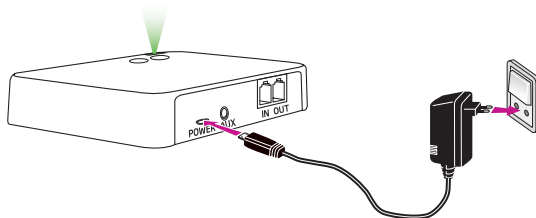


2. Phone Adapter konfigurieren

Ziehen Sie das Telefonkabel aus dem Telefon und verbinden Sie es mit der IN Buchse des Phone Adapters.

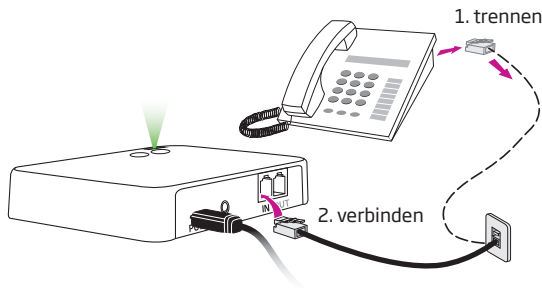

3. Installation abschließen


Nehmen Sie das Verbindungskabel (Anschluss ist an beiden Seiten gleich) und stecken Sie das eine Ende in die OUT Buchse des Phone Adapters. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Telefon.

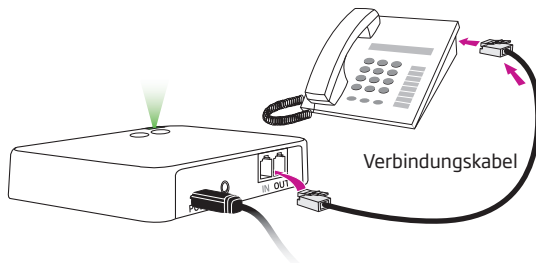

Kopplung von Streamer Pro und Phone Adapter

Wichtig:



Phone Adapter ist mit dem Netzstrom verbunden.
Streamer Pro ist vollständig geladen.

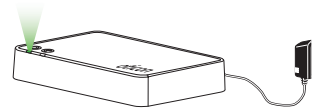

1. Streamer Pro und Phone Adapter koppeln


Drücken Sie die An/Aus Taste am Streamer Pro für 7 Sekunden bis die blaue LED schnell blinkt.

Legen Sie den Streamer Pro in die Nähe (ca. 20 cm) des Phone Adapters.

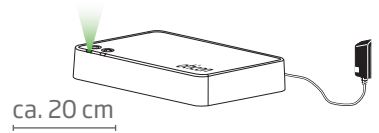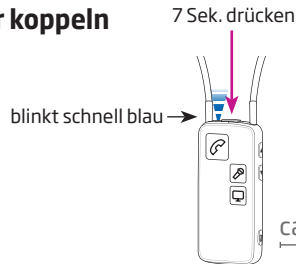

2. Kopplung abschließen

Warten Sie ca. 1 Minute bis die Kopplung abgeschlossen ist. Der Streamer Pro leuchtet konstant gelb und die LED des Phone Adapters leuchtet konstant blau.

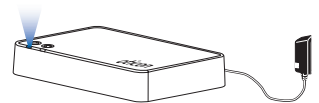

Kopplung von Streamer Pro und Handy

Wichtig:


Streamer Pro ist vollständig geladen.

1. Streamer Pro und Handy koppeln

Bereiten Sie Ihr Handy auf die Kopplung vor, indem Sie die Suchfunktion des Bluetooth-Menüs aktivieren.

Drücken Sie die An/Aus Taste am Streamer Pro für 7 Sekunden bis die blaue LED schnell blinkt.

Legen Sie den Streamer Pro in die Nähe (ca. 20 cm) des Handys.

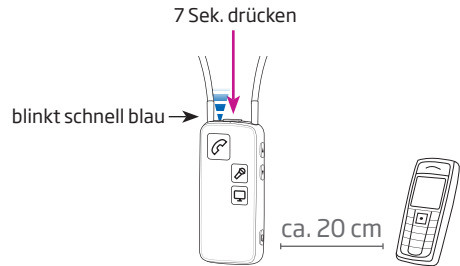

2. Kopplung abschließen

Warten Sie ca. 1 Minute bis die Kopplung abgeschlossen ist. Der Streamer Pro leuchtet konstant blau.



Hinweis:

Bei einigen Handys ist möglicherweise die Eingabe des Streamer Pro Pin-Codes erforderlich. Dieser lautet 0000 (vier Nullen).*

*Die genaue Kopplung mit dem Handy unterscheidet sich je nach Handymodell.

Mikrofon

Installation und Kopplung

Kopplung von Streamer Pro und Mikrofon

Wichtig:


Mikrofon und Streamer Pro sind vollständig geladen.

1. Streamer Pro und Mikrofon koppeln

Drücken Sie die An/Aus Taste am Streamer Pro für 7 Sekunden bis die blaue LED schnell blinkt.


Drücken Sie die Taste am Mikrofon für 7 Sekunden bis die orangefarbene LED schnell blinkt.

Legen Sie den Streamer Pro in die Nähe (ca. 20 cm) des Mikrofons.

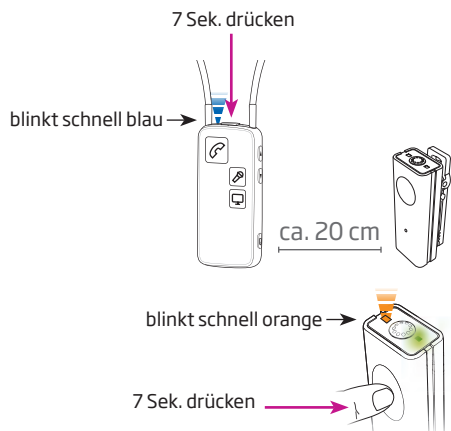



2. Kopplung abschließen

Warten Sie ca. 1 Minute bis die Kopplung abgeschlossen ist. Die Mikrofontaste des Streamer Pro und die LED des Mikrofons leuchten konstant orange.

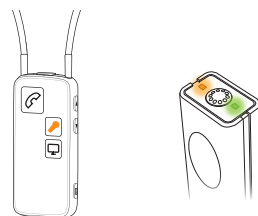

Wenn Sie mehr wissen möchten, schauen Sie hier:

Bedienungs-
anleitungen

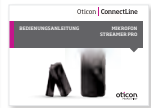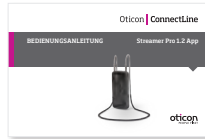

Genie Software –
Demo Videos zu ConnectLine



eCaps Pro



Datenblätter



Produkt-, Endkunden- und
Beratungsbroschüre



Hinweis: Erhältlich auf MyOticon.de und über Ihren Außendienstler bzw. den Kundenservice bestellbar.

People First

Unser Versprechen
für Kommunikation
und Lebensqualität.