

# Roger Clip-On Mic

1.1

Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Guía rápida de instalación



roger




**PHONAK**  
life is on

## Device description

## Produktbeschreibung

## Description de l'appareil

## Descripción del dispositivo

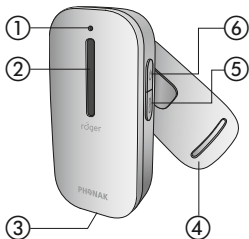







- ① Indicator light (LED)  
Leuchtanzeige (LED)  
Témoin lumineux (LED)  
Indicador luminoso (LED)
- ② Microphones  
Mikrofone  
Microphones  
Micrófonos
- ③ Charging and audio input (micro-USB)  
Aufladen / Audioeingang (Mikro-USB)  
Prise chargeur et entrée audio (micro-USB)  
Entrada de audio y carga (micro-USB)
- ④ Turnable clip  
Drehbarer Clip  
Clip rotatif  
Pinza giratoria
- ⑤ Connect  
Connect-Taste  
Connexion  
Conexión
- ⑥ On / Off / Mute  
Ein- / Aus- / Stummschalt-Taste  
Marche / Arrêt / Muet  
Encendido / Apagado / Silencio

Indicator light (LED status)

Leuchtanzeige (LED-Status)

Témoin lumineux (LED status)

Indicador de luminoso (LED status)

-  Switched on / Eingeschaltet / Allumé / Activado
-  Switching off / Ausschalten / Mise à l'arrêt / Apagando
-  Mute / Stumm / Mode sourdine / Modo de silencio
-  Charging / Aufladen / Chargement / Cargar
-  Fully charged / Voll aufgeladen / Complètement chargé / Completamente cargado
-  Low battery. Charge Roger Clip-On Mic  
Niedriger Batteriestand. Laden Sie das Roger Clip-On Mic auf  
Accumulateur faible. Chargez Roger Clip-On Mic  
Pila baja. Cargue el Roger Clip-On Mic


## Setting up the docking station

Dockingstation einrichten


Mise en place de la station d'accueil

Configuración de la base de conexión


A

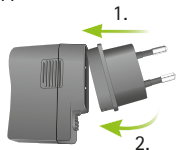


B

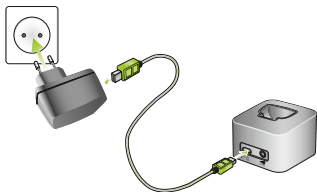

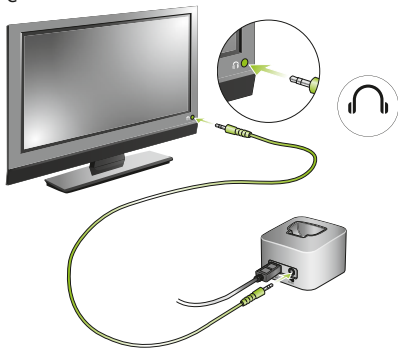

C

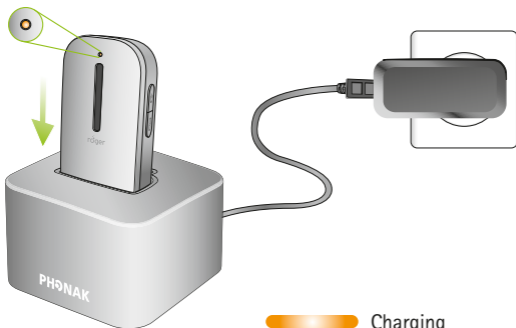

Charging Roger Clip-On Mic  
Roger Clip-On Mic aufladen  
Charger Roger Clip-On Mic  
Cargar el Roger Clip-On Mic



-  Charging  
Aufladen  
Chargement  
Cargar
-  Fully charged  
Voll aufgeladen  
Complètement chargé  
Completamente cargado

Switching on Roger Clip-On Mic  
Roger Clip-On Mic einschalten  
Mettre en marche Roger Clip-On Mic  
Encender el Roger Clip-On Mic




Power on  
Aufstarten  
Mise sous tension  
En el poder



Switched on  
Eingeschaltet  
Allumé  
Activado

Connecting to your Roger receivers  
Verbinden mit Ihren Roger-Empfängern  
Connecter à vos récepteurs Roger  
Conectar sus receptores Roger

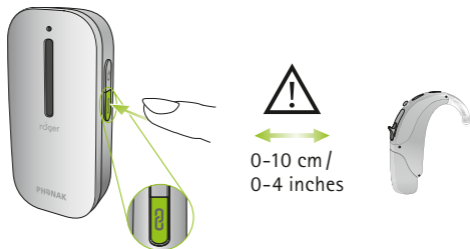

Connecting  
Verbinden  
Connexion  
Conectar




Connection successful  
Verbindung erfolgreich  
Connexion réussie  
Conexión exitosa



No receiver found, go closer  
Kein Empfänger gefunden, gehen Sie näher heran  
Pas de récepteur trouvé, approchez-vous  
No se ha encontrado receptor, vaya más cerca

Wearing Roger Clip-On Mic  
Roger Clip-On Mic tragen  
Porter Roger Clip-On Mic  
Llevar el Roger Clip-On Mic

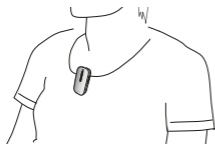

or  
oder  
ou  
o



or  
oder  
ou  
o




or  
oder  
ou  
o





Connecting to a multimedia / audio device  
 Verbinden mit einem Multimedia- / Audiogerät  
 Connexion à un appareil multimédia ou audio  
 Conexión a un dispositivo multimedia o de audio

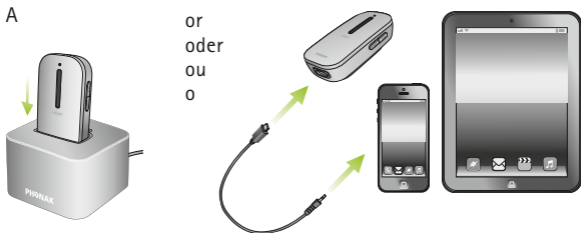

At home / Zu Hause  
 A la maison / En casa

On the go / Unterwegs  
 Sur la route / En camino


B



Switch your multimedia device on and press play/start  
 Schalten Sie nun Ihr Multimediagerät ein und spielen Sie das Audiosignal ab  
 Mettre en marche votre appareil multimédia et presser play/start  
 Encienda el dispositivo multimedia y pulse tocar/empezar



Switching off Roger Clip-On Mic  
Roger Clip-On Mic ausschalten  
Eteindre Roger Clip-On Mic  
Apagar el Roger Clip-On Mic

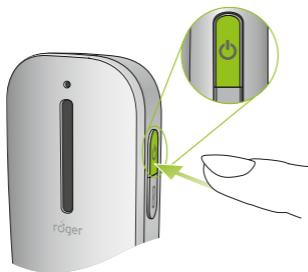

2 seconds  
2 Sekunden  
2 secondes  
2 segundos



Switching off  
Ausschalten  
Mise à l'arrêt  
Apagando



For more detailed usage information, please read the user guide or watch the movies on [www.phonak.com](http://www.phonak.com).

Für mehr detailliertere Anwendungsinformationen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder schauen Sie sich die Videos auf [www.phonak.com](http://www.phonak.com) an.

Pour des informations détaillées sur l'utilisation, s'il vous plaît lire le mode d'emploi ou regarder les films sur [www.phonak.com](http://www.phonak.com).

Para obtener información más detallada, por favor lea la guía del usuario o vea las películas en [www.phonak.com](http://www.phonak.com).

**Manufacturer:**

Phonak Communications AG

Laenggasse 17

CH-3280 Murten

Switzerland

[www.phonak.com/phonak-roger](http://www.phonak.com/phonak-roger)

