

Anleitung zur Kopplung des „RR 2000“

1. Nehmen Sie das System in Betrieb, damit Sie wissen, welcher Hörer schon verbunden ist, diesen legen Sie bitte an die Seite.

2. Nehmen Sie den ungekoppelten Hörer und starten Sie das Kopplungsprocedere.

3. Legen Sie den Hörer auf die Station, bitte nicht auf die Ladekontakte, sondern der Korpus des RR 2000 Hörers sollte dort auf der Station liegen, wo die kleine rote Batterie abgebildet ist (der Hörer darf nicht auf die Ladekontakte).

4. Spreizen Sie den Bügel mit einer Hand und halten Sie diesen gespreizt.

5. Drücken und halten Sie mit der anderen Hand die "+" und "-" Tasten auf dem Hörer gedrückt.
 - Ich empfehle die Tasten so lange gedrückt zu halten, bis die Übertragung einsetzt (deswegen ist es wichtig, dass die Sendestation mit einem Audiosignal versorgt wird).

Freundliche Grüße aus Rheine