



signia

## Wie nutze ich StreamLine Mic als TV Anbindung?

In wenigen Schritten zum Fernseh-Vergnügen

In Kombination mit einem handelsüblichen TV-Transmitter können Sie StreamLine Mic als Alternative zu StreamLine TV für die direkte Übertragung des Fernsehtons in die Hörgeräte benutzen.

Diese Lösung lässt sich für alle Bluetooth-fähigen Fernseher und Setup-Boxen anwenden, inkl. Fire Stick/Cube von Amazon oder Apple TV.

Als TV-Transmitter empfehlen wir diese von uns getesteten Geräte, die bei Amazon erhältlich sind:



<https://amzn.to/3Hoylxq>  
Avantree Audikast Plus



<https://amzn.to/3tq5B7e>  
Avantree TC417 aptX



<https://amzn.to/39gTySZ>  
FeinTech Bluetooth 5.0

So geht's – am Beispiel des FeinTech Bluetooth 5.0 Audio Senders:

1. Verbinden Sie die Hörgeräte mit StreamLine Mic.

1. StreamLine Mic aus- und wieder einschalten.
2. Das Hörgerät aus- und wieder anschalten.
3. Platzieren Sie beide Hörgeräte in der Nähe des StreamLine Mic. Maximale Entfernung: 20 cm.

Der Kopplungsprozess beginnt automatisch. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die Status-Anzeige von StreamLine Mic gelb.



**Hinweis:** Die Kopplung muss nur ein einziges Mal durchgeführt werden. Hierauf wird die Verbindung gespeichert und erfolgt daraufhin immer unmittelbar beim Einschalten der Hörgeräte.

2. Verbinden Sie einen beliebigen TV-Transmitter mit StreamLine Mic und achten Sie auf die richtige Einrichtung des TV-Transmitters.

- Nutzen Sie die richtigen Eingänge. Entweder AUX mit Klinke oder SPDIF TX für den optischen Eingang. Die Stromversorgung kann über den USB-Port des TV-Gerätes erfolgen.



- Wählen Sie die richtige Funktion: TX = Eingang TV-Signal.



- Halten Sie nach dem Einschalten die Powertaste am TV-Transmitter 2 Sekunden, sowie die Powertaste am StreamLine Mic ca. 10 Sekunden gedrückt. Nun sollten bei beiden Geräten blaue LED blinken.
- Innerhalb von 3 Minuten sollten die Geräte automatisch gekoppelt sein.



**Tipp:** Geben Sie dem Transmitter während der Kopplung ein Eingangssignal, indem Sie einfach ein TV-Programm im Kopplungsprozess aufrufen oder ein Video abspielen. Dies beschleunigt die Kopplung.

**Fertig?** Nach korrekter Kopplung wird der TV-Ton auf die Hörgeräte übertragen.

**Wichtig:** StreamLine Mic kann in der Nähe des TV bleiben und ggf. mit einem zweiten USB-Port angeschlossen werden. Andernfalls kann das StreamLine Mic über ein handelsübliches Netzteil oder per Akku betrieben werden.

Da der TV-Transmitter bei der Übertragung in die Hörgeräte den Umweg über StreamLine Mic geht, kann es vereinzelt zu leichten Ton-Verzögerungen kommen. Diese sind allerdings nur dann störend, wenn der TV-Sound zusätzlich über den Luftleitungsweg ausgegeben wird.

### Drei Lösungen für Ton-Verzögerungen:

1. Schalten Sie den TV-Ton aus und hören Sie den TV-Ton ausschließlich über die Hörgeräte.
2. Im Fall von zwei NutzerInnen: Koppeln beide NutzerInnen an einem TV-Transmitter zwei StreamLine Mic oder ein StreamLine Mic und einen Kopfhörer. Anschließend kann der TV-Ton per Lautsprecher ausgeschaltet werden.
3. Ihr/e HörakustikerIn kann in der Anpasssoftware Ihrer Hörgeräte Einstellungen vornehmen, die den Lautsprecher-Ton nicht mit dem Streaming-Signal vermischen. Fragen Sie dazu einfach in Ihrem Hörakustik-Fachgeschäft nach.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen uneingeschränkten Fernseh-Genuss!**