


WIDEX TV PLAY

WICHTIGE HINWEISE

1. Die Steuerung von TV PLAY wurde speziell auf die Evoke-App abgestimmt. **Nur unter Verwendung der Evoke-App ab V 1.1 (für iOS und Android) ist die Nutzung aller TV PLAY-Produkteigenschaften möglich.**

Eine Verwendung mit Smartphone stellt zudem sicher, dass die Evoke FUSION 2-Hörsysteme immer mit der aktuellsten Firmware versorgt werden.

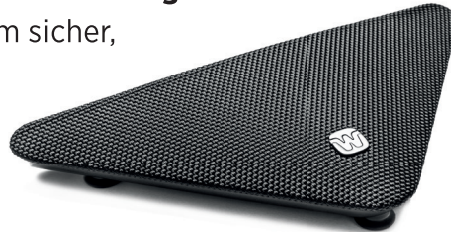

2. Sollte bei einer Versorgung mit Evoke FUSION 2 kein Smartphone vorhanden sein, dann ist auch für diese Anwender die bewährte **TV-Dex** die optimale Lösung zur Anbindung an einen Fernseher.

3. Eine Nutzung von **TV PLAY ohne Smartphone wird seitens Widex nicht empfohlen** und auch nicht als Produkteigenschaft unterstützt. Sollte das Smartphone jedoch einmal nicht zur Hand sein, besteht die Möglichkeit, durch eine erneute Paarung von Hörsystem und TV PLAY den Stream trotzdem zu starten:

- Abstand zwischen Hörsystem und TV PLAY muss kleiner als 1 m sein
- Öffnen und Schließen des Hörsystembatteriefachs startet den Paarungsmodus
- Warten bis TV-Audiosignal in den Hörsystemen hörbar ist

Erfolgt keine Abschaltung der TV PLAY und keine Veränderung am Hörsystem, kann der Übertragungsbereich verlassen (Abbruch der Audioübertragung) und wieder betreten werden (automatischer Start der Audioübertragung), ohne dass ein erneutes Paaren notwendig ist. Nach Beenden des Streams (Ausschalten des Fernsehers) ist zwingend ein Neustart der Hörsysteme (Öffnen und Schließen des Batteriefachs) notwendig, um wieder eine normale Hörgeräte-Übertragung herzustellen und die Universalautomatik (Sound Classes) zu aktivieren.

Nutzung von Evoke FUSION 2 mit TV PLAY und RC-Dex:

Ein Verwenden der RC-Dex während des TV PLAY-Streamings ist möglich.

- +/- regelt die Lautstärke des TV PLAY-Streaming-Signals
- Langes Drücken der RC-Dex-Programmtaste beendet den TV PLAY-Stream und gibt den Zugriff auf die normale Hörsystemsteuerung wieder frei (Bestätigung durch „Gong“ und Ansage „Universal“)
- Zum erneuten Starten des TV PLAY-Streamings die TV PLAY in der Evoke-App wieder aktivieren

Nutzung von Evoke FUSION 2-Bedienelementen mit TV PLAY bei aktivem Stream:

- Taster für Präferenzsteuerung programmiert: Lautstärke-Steuerung des TV PLAY-Signals
- Taster für Programmwahl programmiert: Ohne Funktion
- Kombitaster für Präferenz & Programmwahl: Nur Lautstärkesteuerung des TV PLAY-Signals
- Kombitaster für Präferenz & Stummschaltung: Lautstärkesteuerung TV PLAY-Signal + Stummschaltung des kompletten Systems (TV PLAY-Signal + Hörsystemmikrofone)